

Monitor de Presión Arterial Tensiómetro Digital de Muñeca Completamente Automático Modelo BP 103



HomeLife
Best For Your Life

HomeLife
Best For Your Life

Información de Contacto:
Distribuido por HOME MEDICAL GROUP SAS
www.homelife.com.co
ventas@homemedicalgroup.com

Facebook: @homelifecol Twitter: @homelifecol Instagram: homelifecol

Manual Tensiómetro BP-103 Best For Your Life HomeLife

Contenido

1

Aviso de seguridad

2

Aviso de seguridad	02
Ilustración del equipo	06
Consideraciones importantes	09
Inicio rápido	10
Operación del equipo	12
Ilustración de batería	12
Sistema de ajuste	13
Aplicación del monitor de muñeca	16
Pruebas	18
Apagado	23
Comprobar memoria	24
Promedio de las últimas 3 pruebas	26
Borrar memoria	27
Indicador de batería baja	28
Solución de problemas	29
Información de la presión arterial	30
Preguntas y respuestas de presión arterial	34
Mantenimiento	36
Especificaciones	40
Garantía	44

Gracias por comprar el monitor de presión arterial BP 103. La unidad se ha construido utilizando circuitos confiables y materiales duraderos. Utilizada correctamente, esta unidad proporcionará años de uso satisfactorio.

El dispositivo está diseñado para ser utilizado por adultos mayores de 12 años, para medir la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca. Todos los valores se pueden leer en una PANTALLA LCD.

La medición de la presión arterial determinada con este dispositivo es equivalente a la obtenida por un observador capacitado que utiliza el método de auscultación de brazalete y estetoscopio, dentro de los límites prescritos por la norma nacional Americana (ANSI / AAMI Sp10) para los esfigmomanómetros electrónicos.

Precauciones para garantizar una operación segura y confiable

1. No deje caer la unidad. Proteger de golpes repentinos.
2. No inserte objetos extraños en ninguna abertura.
3. No intente desmontar la unidad.
4. No aplastar el brazalete de presión.
5. Si la unidad se ha almacenado a temperaturas inferiores a 0 ° C, déjela en un lugar cálido durante aproximadamente 15 minutos antes de usarla.
6. No almacene la unidad bajo la luz directa del sol, Humedad alta o polvo.
7. Para evitar cualquier posibilidad de estrangulamiento accidental, mantenga esta unidad alejada de los niños y no cubra los tubos alrededor de su cuello.
8. Asegúrese de que los niños no usen el instrumento sin supervisión, algunas partes son lo suficientemente pequeñas como para ser tragadas.
9. Algunos pueden sufrir una irritación de la piel con el brazalete que toma lecturas frecuentes a lo largo del día. Por lo general, esta irritación desaparece por sí sola después de retirar el monitor.

Manual Tensiómetro BP-103 Best For Your Life HomeLife

Aviso de seguridad

3

Aviso de seguridad

4

Instrucciones importantes antes del uso

1. No confundas el autocontrol con el autodiagnóstico.
Las mediciones de la presión arterial solo deben ser interpretadas por un profesional de la salud que esté familiarizado con su historial médico.
2. Contacte a su médico si los resultados de las pruebas indican regularmente lecturas anormales.
3. Si está tomando medicamentos, consulte a su médico para determinar el momento más adecuado para medir su presión sanguínea. NUNCA cambie un medicamento prescrito sin antes consultar con su médico.
4. Las personas con problemas graves de circulación pueden experimentar molestias. Consulte a su médico antes de usar.
5. Para personas con circulación irregular o inestable como resultado de diabetes, enfermedad hepática, arteriosclerosis u otras afecciones médicas, puede haber variaciones en los valores de presión arterial medidas en la muñeca y en la parte superior del brazo. Vigilar las tendencias en la presión arterial tomadas en cualquiera de las muñecas, es útil e importante.
6. las personas que sufren de constricción vascular, trastornos hepáticos o diabetes, las personas con marcapasos cardíacos o pulso débil, y las mujeres que están embarazadas deben consultar a su médico antes de medir ellos mismos la presión arterial. Se pueden obtener diferentes valores debido a su condición.
7. Las personas que sufren de arritmias como latidos prematuros auriculares o ventriculares o fibrilación auricular solo utilizan este monitor de presión arterial en consulta con su médico. En ciertos casos, el método de medición oscilométrica puede producir lecturas incorrectas.
8. Las mediciones demasiado frecuentes pueden causar lesiones al paciente debido a la interferencia del flujo sanguíneo.
9. El brazalete no debe ponerse sobre una herida, ya que puede causar más lesiones.

10. NO conecte el brazalete a una extremidad que se utilice para infusiones IV o cualquier otro acceso intravascular, terapia o derivación arterio venosa (AV). El inflado del brazalete puede bloquear temporalmente el flujo sanguíneo, lo que puede causar daños al paciente.
11. El brazalete no debe colocarse en el brazo del lado de la mastectomía, en el caso de una mastectomía doble use el lado del brazo dominante.
12. La presurización del brazalete puede ocasionar temporalmente la pérdida de la función del equipo de monitoreo utilizado simultáneamente en la misma extremidad.
13. Una manguera de conexión comprimida o doblada puede causar presión continua en el brazalete, lo que ocasiona interferencia en el flujo sanguíneo y lesiones potencialmente dañinas para el paciente.
14. Compruebe que el funcionamiento de la unidad no ocasione un deterioro prolongado de la circulación del paciente.
15. El producto está diseñado solo para su uso previsto. No abuse de ninguna manera.
16. El producto no está diseñado para bebés o personas que no pueden expresar sus intenciones.
17. Cualquier riesgo asociado con una sobre inflación prolongada de la vejiga puede suceder.
18. No desmonte la unidad ni el brazalete del brazo. No intente repararlo.
19. use solo el brazalete aprobado para esta unidad. El uso de otros brazaletes puede dar como resultado resultados de medición incorrectos.
20. el sistema puede producir lecturas incorrectas si se almacena o se usa fuera de la temperatura y humedad especificadas por el fabricante.
21. No use teléfonos celulares u otros dispositivos que generen campos eléctricos o electromagnéticos fuertes cerca del dispositivo, ya que pueden causar lecturas e interferencias incorrectas o convertirse en una fuente de interferencia para el dispositivo.

Manual Tensiómetro BP-103 Best For Your Life HomeLife

Manual Tensiómetro BP-103 Best For Your Life HomeLife

Aviso de seguridad

5

22. No mezclar baterías nuevas y viejas simultáneamente.
23. Reemplazar las baterías cuando el indicador de batería baja .
24. No mezcle tipos de baterías. Se recomiendan pilas alcalinas de larga duración.
25. Retire las baterías del dispositivo cuando no esté en funcionamiento durante más de 3 meses.
26. No inserte las baterías con sus polaridades incorrectamente alineadas.
27. Deseche las baterías adecuadamente, observe las leyes y regulaciones locales.
28.  Consulte el manual de instrucciones / símbolo del folleto.

Ilustración del equipo

6

Unidad de monitor

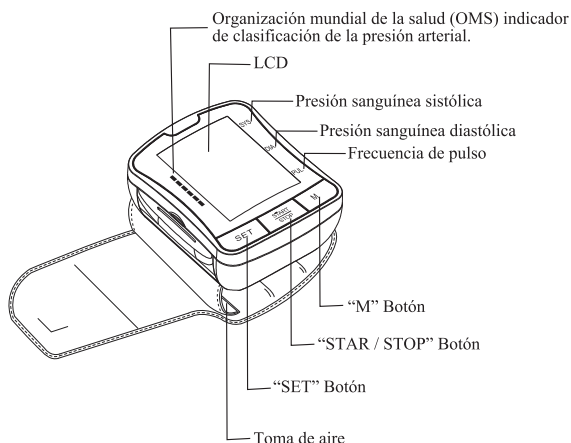


Ilustración del equipo

7

Pantalla

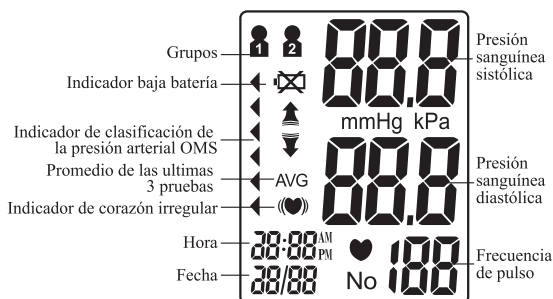


Ilustración del equipo

8

Contenido



Consideraciones importantes

9

1. Evite comer, hacer ejercicio y bañarse durante 30 minutos antes de la prueba.
2. Sentarse en un ambiente de calma durante al menos de 5 minutos antes de la prueba.
3. Durante la prueba, sentarse en una posición relajada, manteniendo el nivel de la muñeca al nivel del corazón.
4. Evitar hablar o mover partes del cuerpo durante la prueba.
5. Evitar transferencias electromagnéticas fuertes, como hornos microondas y teléfonos celulares.
6. Esperar 20 minutos antes de intentar una nueva medición.
7. Trate de medir su presión arterial a la misma hora todos los días para mantener la coherencia.
8. Prueba de comparaciones deben hacerse solo cuando se utiliza el equipo en la misma posición, y al mismo momento del día.
9. El equipo de presión arterial no está recomendado para personas con arritmia grave.

Cualquier registro de presión arterial puede verse afectado por los siguientes factores:

1. la posición del sujeto, su condición fisiológica;
2. el rendimiento y la precisión del dispositivo;
3. tamaño del brazalete: un brazalete demasiado pequeño (vejiga) producirá un valor de presión arterial más alto de lo normal, un brazalete demasiado grande (vejiga) producirá un valor de presión arterial más bajo;
4. la posición de medición no se mantiene al nivel del corazón;
5. hablar o mover partes del cuerpo durante la prueba;
6. no relajarse durante unos 5 minutos antes de tomar la medida.

Inicio rápido

10

1. Instalar baterías (ver figura A)

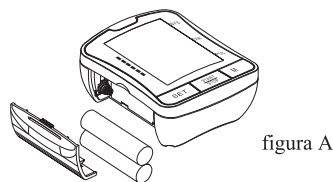


figura A

2. Retirar la ropa del área de la muñeca (ver figura B.)

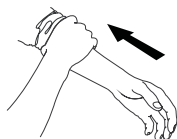


figura B

3. Reposar durante varios minutos antes de la prueba. Envolver el brazalete en la muñeca izquierda. (ver figura C.)

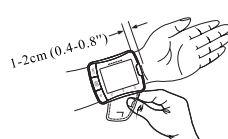


figura C

- Sentarse en una confortable posición y lugar, la muñeca al nivel del corazón (ver figura D.)
- Pulse "START/STOP" botón para iniciar la prueba (ver figura E.)

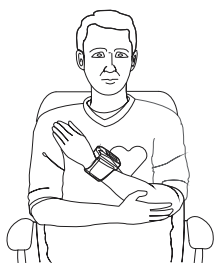


figura D


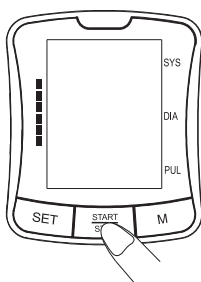


figura E

Instalación de baterías

Retire la tapa de la batería como lo indica la flecha.
Instale 2 baterías alcalinas AAA nuevas de acuerdo a la polaridad.
Cerrar la tapa de la batería.

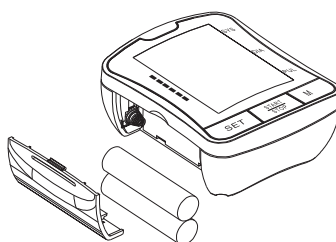

Nota:


- Reemplace las baterías cuando el indicador de batería baja aparece en la pantalla.
- Las baterías deben ser retiradas del equipo cuando no esté funcionando durante un periodo prolongado de tiempo

Ajuste del sistema

Con el equipo apagado, presione "SET" botón para activar la configuración del sistema, el icono de grupo de memoria parpadeara.

1. Seleccione el grupo de memoria.

Mientras que en el modo de configuración del sistema se puede acumular resultados de las pruebas en 2 grupos diferentes. Esto permite que varios usuarios guarden los resultados de prueba individualmente. (Hasta 60 memorias por grupo). Pulse el botón "M" para elegir un grupo: los resultados de las pruebas se almacenan en cada grupo seleccionado.

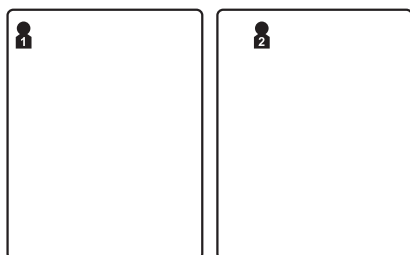

2. Ajuste de Hora / Fecha

Presione el botón "SET" de nuevo para ajustar el modo de hora/fecha. Ajuste el año primero ajustando el botón "M" pulse el botón "SET" de nuevo para confirmar mes: continúe ajustando día, horas y minutos de la misma manera. Cada vez que se pulsa el botón "SET" se bloqueara en su selección y continuara en la serie (mes, día, hora y minutos).




3. Formato de ajuste hora

Presione el botón "SET" de nuevo para establecer el modo de formato de hora.

Establecer formato de hora ajustando el botón "M".

EU significa tiempo europeo, US significa tiempo americano.

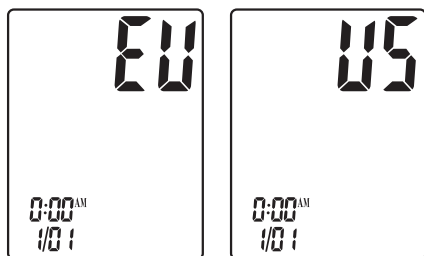

4. Guardar ajuste


Mientras que este en cualquier modo de configuración, pulse el botón "START / STOP" se apagará la unidad y toda la información se guardará.

Nota: el equipo guardará automáticamente toda la información y se apagará si se deja inactivo durante 3 minutos.

Posición del monitor de muñeca

No colocar sobre la ropa. Si está vistiendo una camisa de manga larga, asegúrese de doblar la manga hasta el antebrazo.

Colocar el monitor para la muñeca como se ilustra, apriete el brazalete firmemente que no se mueva.

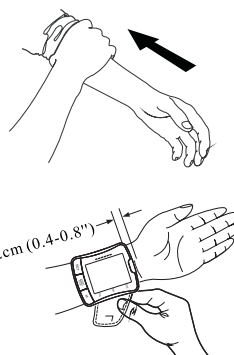


No se pare durante la prueba. Sentarse en una posición cómoda y coloque la muñeca al nivel del corazón.



Pruebas

1. Encendido


Pulse y mantenga el botón "START / STOP" hasta que suene un pitido. La pantalla LCD aparecerá durante un segundo, el equipo realiza un diagnóstico rápido. Un tono largo indica que el equipo está listo para pruebas.

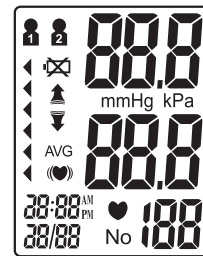

Nota: el equipo no funcionara si el aire residual de la anterior prueba está presente en el brazalete. La pantalla LCD parpadeara "↓" hasta que se establezca la presión.

2. la presurización

La presión inicial se bombea en 190mmHg. Si la corriente de la presión arterial sistólica del usuario es mayor de 190mmHg. El equipo automáticamente vuelve a inflar al apropiado valor.

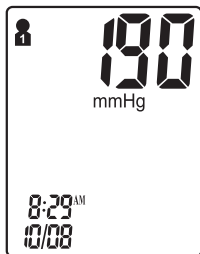

Nota: la presurización va a disminuir de forma gradual y en última instancia se detiene, cuando el brazalete no se coloca adecuadamente en la muñeca, si esto ocurre pulse el botón "START /STOP" para encender el equipo.

3. Pruebas


Después de que infle el brazalete, el aire va a disminuir lentamente como lo indica el valor de la presión correspondiente. Un parpadeo "♥" aparecerá simultáneamente en la pantalla de señalización de detección del ritmo cardiaco.



Nota: permanezca relajado durante la prueba. Evitar hablar o mover partes del cuerpo.

4. Mostrar el resultado

Tres tonos cortos suenan cuando se completa la prueba. La pantalla mostrara las mediciones de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Un indicador que representa la medición actual aparecerá al lado de la correspondiente clasificación de la OMS.

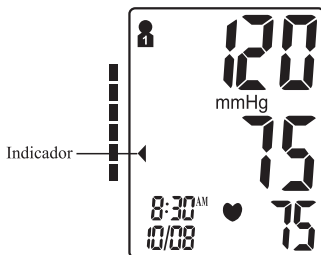

Nota: consulte la página 30-31 para el detalle de la presión arterial de la OMS información clasificada.

Indicador de latidos irregulares del corazón

Si el equipo detecta un ritmo irregular dos o más veces durante el proceso de medición, el latido irregular del corazón "♥" aparecerá en la pantalla junto con los resultados de la medición. Ritmo cardiaco irregular se define como el ritmo que es 25% más lento o más rápido que el ritmo promedio que se detecta mientras que la medición de la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Consulte a su médico si el símbolo "♥" de latido irregular del corazón aparece con frecuencia con los resultados de la prueba.

5. Eliminar/Almacenar resultados de la prueba

El usuario puede eliminar su resultado actual de tres debido a condiciones de prueba desfavorables o por cualquier otro motivo. Para eliminar el último resultado de la prueba, presione el botón "SET" después de que se muestre el resultado. Si el resultado no se elimina, se almacenará automáticamente por fecha dentro del grupo de memoria configurado previamente.

Nota: asegúrese de que la selección apropiada del grupo de memoria es hecho antes de la prueba.

Si el número de pruebas supera las 60 memorias asignadas por grupo, las pruebas más recientes aparecerán en primer lugar, eliminando así las lecturas más antiguas.

Apagado

El botón "START / STOP" se puede presionar para que se apague el equipo en cualquier modo.


El equipo se puede desconectar y alrededor de 3 minutos sin operación en cualquier modo se apagará.

Precaución de seguridad: si la presión en el brazalete se vuelve demasiado extrema en las pruebas, presione el botón "START / STOP" para activar apagado.

La presión del brazalete se disparara rápidamente una vez que el equipo este apagado.

Comprobación de memoria


Con el equipo apagado, usted puede comprobar los resultados de las pruebas anteriores mediante el botón "M". Tras la activación de resultados de la prueba, puede pulsar el botón "M" para desplazarse por todos los resultados almacenados en la memoria. La pantalla LCD muestra las últimas mediciones en la memoria como No: 1 lectura.

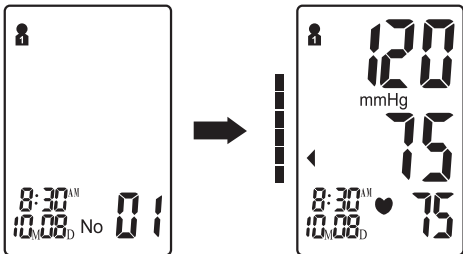

Nota: los resultados de las pruebas anteriores solo se mostraran a partir de los más recientes usando el grupo de la memoria. Para comprobar los resultados de pruebas anteriores en otros grupos de la memoria, primero debe seleccionar el grupo deseado y luego apagar la pantalla (consulte "seleccionar grupo de memoria" en la página 12.)


Promedio de las ultimas 3 pruebas

Con el equipo apagado, presione el botón "M" para activar la pantalla de visualización. Después que el equipo realiza un autodiagnóstico, la pantalla mostrara los resultados promedio de las últimas 3 lecturas del grupo. El símbolo "AVG" aparecerá junto con el correspondiente indicador de la presión arterial de la OMS. Comprobar el modo de memoria se puede acceder pulsando la tecla "M". Para comprobar los resultados promedio de otros grupo, seleccione el grupo deseado primero antes de activar el botón "M" en la posición de apagado (consulte "seleccionar grupo de memoria en la página 13)

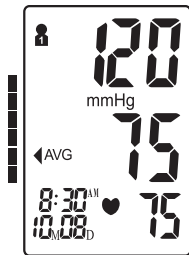

Borra memoria


Para eliminar el grupo de memoria. Pulse el botón "SET" aproximadamente 3 segundos para borrar todos los registros de los grupos de memoria seleccionada. El equipo emitirá un pitido que indica eliminación exitosa y luego transferir en modo de prueba. Para eliminar memorias de otros grupos, consulte "seleccionar grupo de memoria" en la página 13. A continuación pulse el botón "START / STOP" para apagar el equipo.

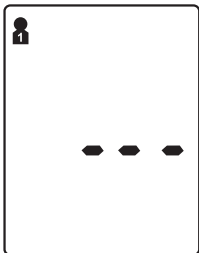

Nota: la memoria no se puede recuperar una vez ha sido eliminada.

Indicador de batería baja

Suenan 4 pitidos cortos de advertencia cuando la batería este agotada y no infle el brazalete para la prueba. Aparece "X" imultáneamente durante aproximadamente 5 segundos antes de apagarse. Cambie las baterías en este momento. No se producirá ninguna pérdida de memoria en todo este proceso.

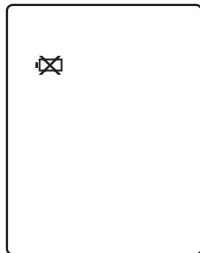


Brazalete

Problema	Posible causa	Solución
resultados de la presión arterial no están dentro del rango típico	brazalete está demasiado apretado o no se lo colocó correctamente en la muñeca	firmermente reposicionar el brazalete en la muñeca asegurandose que no se mueva (ver página 16)
	resultados inexactos debido al movimiento del cuerpo o movimiento del equipo	Sentarse en una posición relajada colocar la muñeca al nivel del corazón. Evitar hablar o mover partes del cuerpo mientras la prueba. Este seguro que la unidad está colocada en un punto fijo durante el tiempo de la prueba (ver página 11)
"Err" Monitor	brazalete no se infla correctamente	asegúrese de que la manguera está sujeta al brazalete y al equipo
	la operación incorrecta	lea el manual del usuario cuidadosamente y vuelva a probar adecuadamente
	la presurización es más de 300 mmHg	lea el manual del usuario cuidadosamente y vuelva a probar adecuadamente

Presión arterial

La presión arterial es una fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide en milímetros de mercurio (MmHg). La presión arterial sistólica es la fuerza máxima ejercida contra la pared de los vasos sanguíneos cada vez que late el corazón. La presión arterial diastólica es la fuerza ejercida sobre los vasos sanguíneos cuando el corazón descansa entre latidos. La presión arterial de una persona con frecuencia cambia o lo largo del transcurso del día. La emoción y la tensión pueden provocar que la presión de la sangre aumente, mientras que el consumo de alcohol y bañarse puede bajar la presión sanguínea. Ciertas hormonas como la adrenalina (que su cuerpo libera bajo estrés) pueden causar que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que conduce a un aumento en la presión arterial.


Si estos números de medición son demasiado altos, significa que el corazón está trabajando más duro de lo que debería.

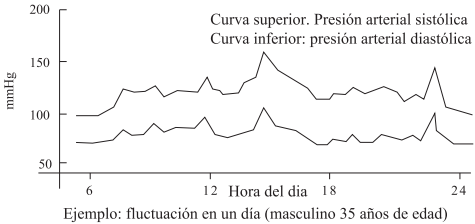

Informacion de la presion arterial

El BP 103 está equipado con un indicador de clasificación basada en las directrices establecidas por la organización mundial de la salud. La tabla a continuación (código de color en la unidad de pantalla) indica resultados de la prueba.


OMS Indicador de clasificación de la presión arterial

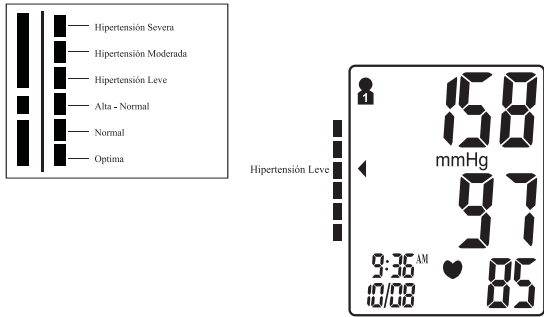

Indicador de clasificación de la presión arterial

Recordatorio de la salud

La hipertensión arterial es una enfermedad peligrosa que puede afectar la calidad de vida. Puede conducir a gran cantidad de problemas, incluyendo la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y hemorragia cerebral. Al mantener un estilo de vida saludable y visitar a su médico sobre una base regular, la hipertensión y enfermedades relativas son mucho más fáciles de controlar cuando se diagnostica en las primeras etapas.

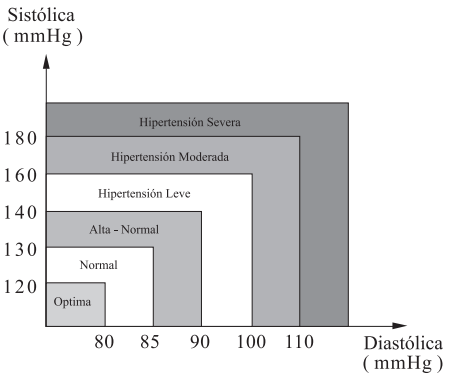

Nota: no se alarme si se produce una lectura anormal. Una mejor indicación de la presión arterial de un individuo se produce después de 2-3 lecturas si son tomadas al mismo tiempo, cada día durante un periodo prolongado de tiempo. Consultar a su médico si los resultados siguen siendo anormales.



P: ¿Cuál es la diferencia entre la medición de la presión arterial en casa o en una clínica profesional de la salud?

R: lecturas de presión arterial tomadas en casa son el mejor reflejo de su estado de salud en su vida diaria. Las lecturas pueden ser elevadas cuando se toma en una clínica o medio ambiente. Esto se conoce como hipertensión de bata blanca y puede ser causada por sentirse ansioso o nervioso.

Nota: los resultado anormales pueden ser causados por:

1. Colocar el brazalete incorrecto, asegure el brazalete apretando un poco no demasiado.
2. Posición corporal inadecuada asegúrese de mantener su cuerpo en una posición vertical
3. Se siente ansioso o nervioso
4. Tome 2-3 repeticiones profundas, espere unos minutos y continúe con las pruebas.

P: ¿Que provoca diferentes lecturas?

R: la presión arterial varía durante todo el día. Muchos factores como la dieta, el estrés. La posición del brazalete, etc., pueden afectar la presión arterial de un individuo.

P:¿Debo colocar el brazalete en la muñeca izquierda o derecha?

R: En cualquier muñeca se puede hacer la prueba, sin embargo cuando comparamos los resultados, la misma muñeca debe ser utilizada.

Las pruebas en la muñeca izquierda pueden proporcionar resultados más precisos ya que se encuentra más cerca de su corazón.


P: ¿Cuál es la mejor hora del día para la prueba?

R: en la mañana o en cualquier momento que se sienta relajado y libre de estrés.


1. No dejar caer, golpear o tirar la unidad.
2. Evitar las temperaturas extremas. No utilice el aire libre.




3. Al limpiar la unidad utilice una tela suave y limpie suavemente con detergente suave. Utilice un paño húmedo para eliminar la suciedad y el exceso de detergente.
4. Limpieza del brazalete: no empapar el brazalete de agua! Aplicar una pequeña cantidad de alcohol a un paño suave para limpiar la superficie del brazalete. Use un paño húmedo(a base de agua) para limpiar. Deje que se seque naturalmente a temperatura ambiente.

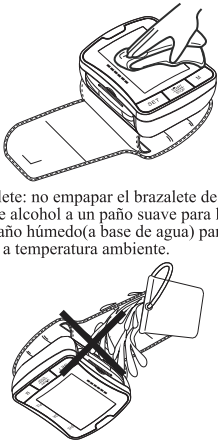

5. No utilice gasolina, thinner o disolventes similares.
6. Retire las baterías cuando no valla hacer usado por un largo tiempo

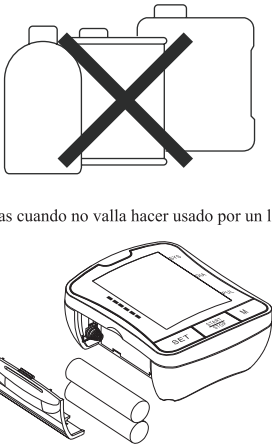

7. No desarme el equipo
8. Es recomendable realizar mantenimiento preventivo del equipo cada 2 años, por favor comunicarse con su proveedor habitual para verificar su costo.
9. El tiempo de vida esperado del equipo es de aproximadamente tres años con 10 lecturas por día.

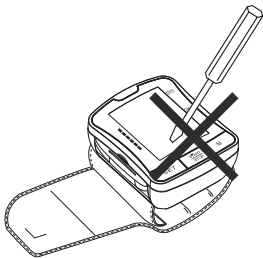

Descripción producto	Tensiómetro digital de muñeca	
Modelo	BP-103	
Monitor	LCD pantalla digital tamaño 49mm x 38mm	
Método de medida	Oscilométrico	
Rango de presión	Presión	0mmHg-300mmHg
	Pulso	30 a 180latidos/min
Precisión	Presión	(+ -) 3 mmHg ó (+ -) 2% lectura 200 mmHg
	Pulso	(+ ó -) 5%
Presurización	Automática	
Memorias	120 Memorias en 2 grupos con fecha y hora.	
Función	Detección frecuencia cardiaca irregular	
	indicador clasificación organización mundial de la salud (OMS)	
	promedio de los últimos 3 resultados	
	Detección de baja batería	
Fuente de poder	Apagado automático	
	2 Baterías Alcalinas AAA	

Vida baterías	aproximadamente 2 meses con 3 pruebas diarias	
Peso unidad	Aprox 115g (4,05 oz) excluyendo las baterías	
Dimensiones	Aprox 77x64x32mm (3,03" x 2,52" x 1,26) (L x A x A)	
Circunferencia de Brazalete	Aprox 75(W) x 300(L)mm se ajusta a la circunferencia de la muñeca 13.5-21.5cm (5.3 "-8.5")	
Ambiente a operar	Temperatura	10°C a 40°C (50°F 104°F)
	Humedad	15% A 90%HR
	Presión	Presión atmosférica
Ambiente de almacenamiento	Temperatura	(-)20°C - 55°C
	Humedad	15% a 90% HR
Clasificación protección	IP 22	
Clasificación	Equipo de alimentación interna, tipo BF 	

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin notificarse.

Estándares internacionales:

AAMI / ANSI SP10: 2002 / (R) 2008 y 2002 / A1: 2003 / (R) 2008 y 2002 / A2: 2006 / (R) 2008

Esfigmomanómetros manuales, electrónicos o automatizados directiva europea 93/42 CEE para productos médicos actuar EN 60601-1 Equipos eléctricos médicos parte 1: requisitos generales para la seguridad.

EN 60601-1-2 equipo eléctrico médico parte 1-2: requisitos generales para el estándar de garantía de seguridad: requisitos de compatibilidad electromagnética y prueba.

Requisitos generales de esfigmomanómetros no invasivos EN 1060-1 ES 1060-3 esfigmomanómetros no invasivos requisitos suplementarios generales.

Sistemas electromecánicos de medición de la presión arterial.
Procedimientos de prueba de esfigmomanómetros no invasivos EN 1060-4 para determinar la precisión general del sistema de esfigmomanómetros automáticos no invasivos.

Disposición correcta de este equipo
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Esta marca indica que no se debe eliminar con otros residuos domésticos al final de su vida útil, para prevenir posibles daños ambientales o la salud humana. Separe este producto de otros tipos de desechos y reciclelo responsablemente. Póngase en contacto con el que se lo vendió para que él le indique que hacer con el equipo, o póngase en contacto con empresas ambientales encargadas de reciclar estos equipos digitales. Este producto está libre de materiales peligrosos.

El monitor de presión arterial está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. Si el monitor de presión arterial no funciona correctamente debido a componentes defectuosos. Lo repararemos o lo reemplazaremos libremente. La garantía no cubre los daños a su tensiómetro debido a la mala manipulación.

Póngase en contacto con el que le vendió el equipo para más información.

